

Leistritz

EXTRUSION TECHNOLOGY

Leistritz proteXX GESICHTSVISIER

ANLEITUNG UND DATENBLATT



WIRKSAMER SCHUTZ

HOHER TRAGEKOMFORT

STOSSFEST


CE-ZERTIFIZIERT

protexx-leistritz.com

Leistritz


Made in
Germany

PACKUNGSINHALT:

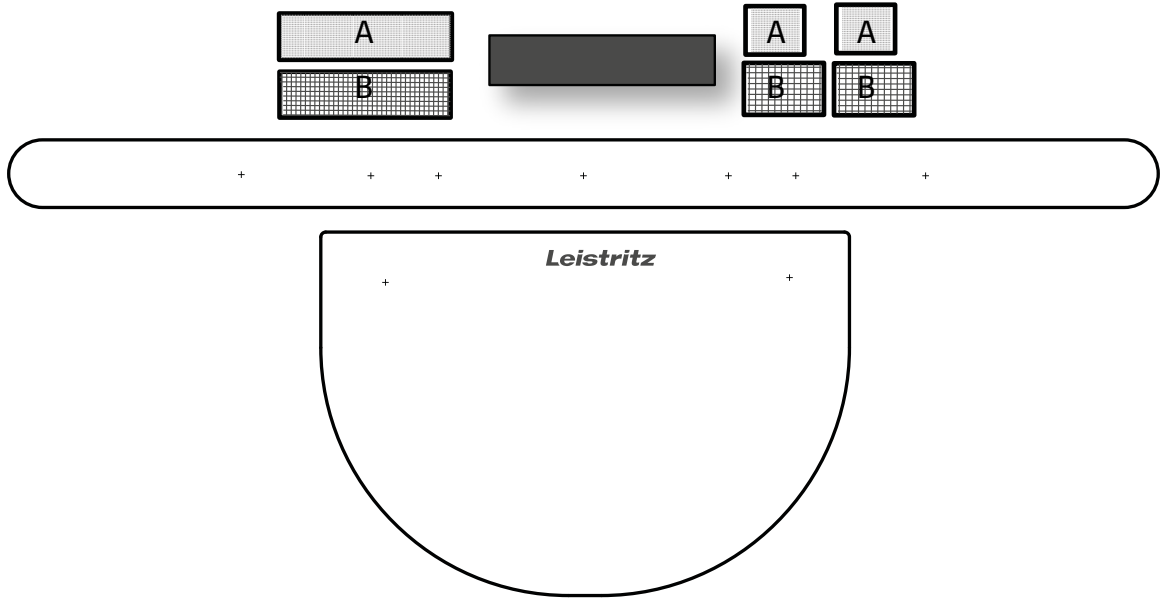

ZUSAMMENBAU


1. Klebestreifen abziehen

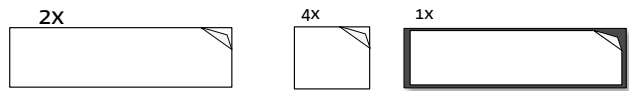


2. Stirnband Vorderseite



3. Stirnband Rückseite

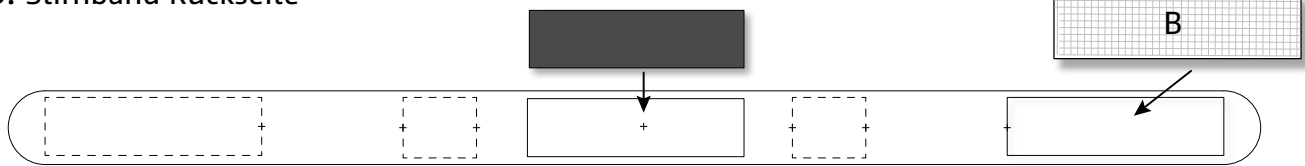

4. Visier Rückseite

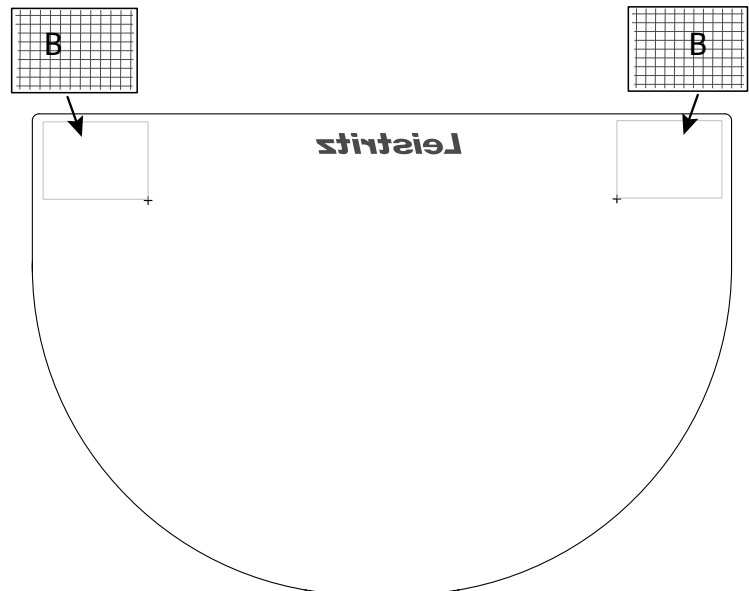

ANWENDUNG



Visier an Stirnband befestigen.



Achten Sie beim Anlegen des Stirnbands darauf, dass das Stirnpolster in der Mitte der Stirn liegt.

Um den Neigungswinkel des Visiers einzustellen, können Sie es vom angelegten Stirnband nehmen und erneut im gewünschten Winkel am Klettband befestigen.



Leistritz proteXX GESICHTSVISIER

PRODUKTDDETAILS

Produktname: Leistritz proteXX (LEX CE)
Schild/Visier: bruchfestes, klares PET
Kopfband: PET + Klettverschluss + Stirnpolster
Visiergröße: 320 x 220 mm
Gewicht: ca. 80 g
Foliendicke: 0,5 mm

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- stoßfest
- Schutz gegen Tropfen und Spritzer von Flüssigkeiten*
- universelle Passform → hoher Tragekomfort:
 - individuell anpassbarer Klettverschluss
 - für Brillenträger geeignet
 - ermüdungsfreies Tragen auch nach mehreren Stunden
- allergikergerecht → frei von PVC und Latex
- umweltfreundlich: komplett recyclebar, da aus PET
- **CE-zertifiziert nach EU 2016/425**

*Damit reduziert Leistritz proteXX die Gefährdung durch eine Tröpfcheninfektion. Ein vollumfänglicher Schutz gegen Viren, Bakterien oder andere biologische Agenzien ist konstruktionsbedingt nur eingeschränkt gegeben. Es ist kombinierbar mit Gesichtsschutzmasken (wenn anwendbar). Das Produkt bietet keinen Schutz gegen mechanische Einwirkungen.

ANWENDUNGSHINWEIS

Vor der Nutzung muss das Produkt auf Beschädigungen geprüft werden. Ist es fehlerhaft, muss es entsorgt werden. Eine Wiederverwendung liegt im Ermessen des Verwenders. Das Produkt kann mit einem Mikrofasertuch gereinigt werden.

Leistritz proteXX hat eine Lagerfähigkeit von 5 Jahren. Bitte trocken und staubfrei lagern und vor UV-Strahlung schützen

Bitte beachten Sie:

Das Visier ist kein medizinisch geprüftes Produkt, sondern ein Behelfsgegenstand. Die Anwendung und Verwendung erfolgt auf eigenes Risiko. Eine unsachgemäße Verwendung des Produkts kann zu Verletzungen und zur Übertragung von Infektionen führen.

Leistritz
Extrusionstechnik GmbH
Markgrafenstraße 36-39
90459 Nürnberg
Germany

Sie haben noch Fragen?
Wir stehen Ihnen
gerne zur Verfügung:
+49 911 4306-9653
protexx@leistritz.com

Zum Webshop geht es ent-
weder via QR-Code oder
direkt unter:

protexx-leistritz.com

